



ELSŐSEGÉLY TERV SZEMBALESET ESETÉRE

plum
www.plum.hu

SZENNYEZŐ ANYAG	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉS	TOVÁBBI ÖBLÍTÉS	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉSI IDŐ
Fizikai szennyeződés esetén pl.: por, kozsz, fém, vagy faforgács	Plum szemkimosó	Plum szemkimosó	Öblítse a szemét az idegen anyag teljes eltávolításáig
Savas sérülés esetén	pH Neutral	Plum szemkimosó	Öblítse a szemét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig és folytassa a szemkimosást Plum szemkimosóval az orvosig.
Lúgos sérülés esetén	pH Neutral	Plum szemkimosó	Öblítse a szemét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig és folytassa a szemkimosást Plum szemkimosóval az orvosig.
Egyéb sérülések pl.: oldószerek, olajok	Plum szemkimosó	Plum szemkimosó	Öblítse szemét a kellemetlen érzés megszűnéséig, vagy az orvosig.
Bőr sérülések esetén pl.:savak, lúgok, vagy egyéb vegyi anyagok	pH Neutral	Plum szemkimosó	Öblítse bőrét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig. Folytassa az öblítést Plum szemkimosóval kellemetlen érzés megszűnéséig, vagy az orvosig.



Plum szemkimosó
pH Neutral




1. Vegye ki a flakont a tartóból



2. Csavarja a védőt ameddig a biztonsági gyűrű eltörik



3. Hajtsa hátra a fejét és kezdje el az öblítést

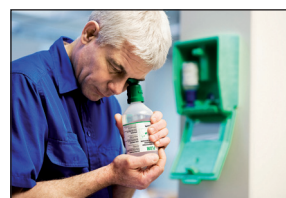

4. Vagy hajtsa előre a fejét és kezdje el az öblítést

FONTOS!

Minden esetben lágy, egyenletes sugárral öblítsük a szemet. A flakont finoman nyomjuk az öblítés folyamán. Az orvos utasításait minden esetben kérjük ki. Az öblítést folytassuk az orvoshoz történő utazás ideje alatt is.