



NAČRT PRVE POMOČI V PRIMERU POŠKODBE OČI Plum

| ONESNAŽEVALCI | PRIPOROČENI NAČIN ZARDEVANJA | DODATNO ZARDEVANJE | PRIPOROČEN ČAS ZARDEVANJA |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Tujek prah, saje, koščki lesa in kovine | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Oko izpiramo, dokler umazanja ni popolnoma odstranjena. |
| Kislina | pH Neutral | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fi ziolaška raztopina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči. |
| Lug | pH Neutral | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fi ziolaška raztopina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči. |
| Ostale kemikalije | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Sredstvo za izpiranje oči Plum | Oko izpiramo, dokler ne dobimo zdravniške pomoči. |



Sredstvo za izpiranje oči Plum je enostavno za uporabo, če je prišlo do nesreče.



Obrnite pokrovček v smeri puščice, dokler se plastenka ne odpre.



Rahlo se naslonite, stisnite plastenko in začnite z izpiranjem.



Zatem lahko oko izpirate tudi tako, da se malo nagnete.

POMEMBNA INFORMACIJA!

Vedno se prepričamo, da je curek tekočine sredstva za izpiranje ob stiku z očmi enakomeren in uravnotežen.

Če sta poškodovani obe očesi, uporabimo sredstvo DUO.