

# Sprej pre výplach rán a očí


Aerosól s 0.9%-ným sterilným roztokom chloridu sodného.

Rýchla a účinná prvá pomoc za sekundy – pre pokožku aj oči!

Nový Plum Sprej pre výplach rán a očí umožňuje okamžitú a účinnú prvú pomoc v prípade drobných poranení (napríklad menšie škrabance, porezania, alebo ak sa do očí dostane prach a nečistoty). Pomáha znížiť riziko ďalšej nákazy alebo poškodenia tkanív.

Plum Sprej pre výplach rán a očí je prenosný, jednoducho sa používa. Obsahuje sterilný roztok chloridu sodného, jeho aplikácia je bezbolestná. Držiak ho v akomkoľvek uhle, poskytuje rovnomerné vyplachovanie. 0.9%-ný sterilný roztok je dosť silný, aby vyčistil z rany cudzie látky, nečistoty, pritom je dostatočne šetrný – preto je vhodný aj na vyplachovanie očí. Doporučuje sa pracovníkom v priemyselnom sektore, pri výrobných linkách, v laboratóriách; osobám, ktorí sa zaoberajú prepravou nebezpečných látok; ako aj spolupracovníkom polície a civilnej obrany.

Šetrný, pritom účinný sprej pre výplach rán a očí!

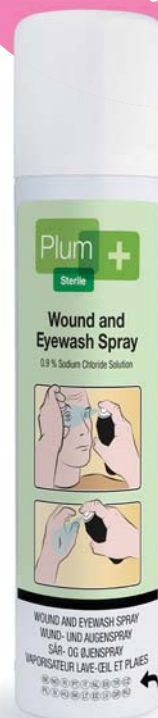


## PREDNOSTI VÝROBKU:

- Manipulácia hoci aj jednou rukou, rýchle použitie
- Bezpečné, precízne, účinné vyplachovanie – S ochranou proti prachu, ktorá chráni trysku pred nečistotami
- Ľahké prenášanie, nehorľavý aerosól
- Obsah nádoby je 100% použiteľný
- Je ekologický a úplne recyklovateľný
- Hypoalergický
- Sterilné riešenie – bez konzervačných látok!
- Minimálna doba trvanlivosti v pôvodnom, neporušenom balení: 3 roky. Dátum spotreby je uvedený na spodnej časti balenia.

PLUM SPREJ PRE VÝPLACH RÁN A OČÍ, S OCHRANOU PROTI PRACHU, 250 ML

- Doba vyplachovania:  $\geq 15$  minút
- Rozmery: V: 240 x  $\varnothing$  52 mm
- Balenie: 12 x 250 ml
- Číslo materiálu: 4554
- Balenie: 24 x 250 ml
- Číslo materiálu: 45540

Plum Sprej pre výplach rán a očí dostal na základe klasifikácie smernice o zdravotníckych pomôckach potrebnú certifikáciu CE.

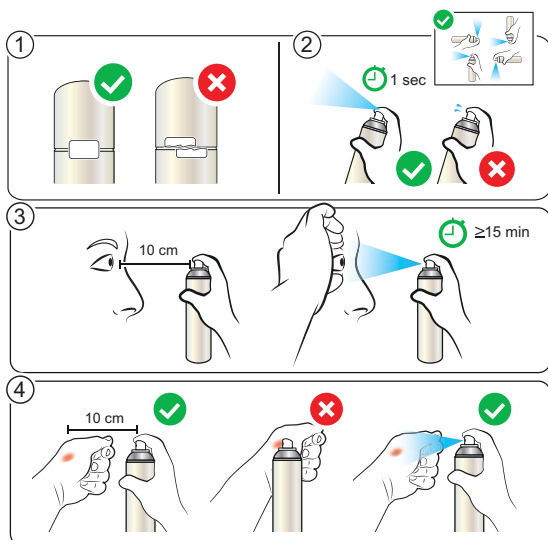

## NÁVOD NA POUŽITIE:

- Sprej sa dá použiť do úplného vyprázdnenia; tekutina ostane do poslednej kvapky sterilná!
- Ak ste pred tým ešte nepoužívali výrobok, poskytuje hoci aj 15 minútové nepretržité vyplachovanie!
- Pred použitím očistite trysku: krátko fúknite do vzduchu!
- Pri aplikácii držte sprej od poraného povrchu (oči, pokožka) v cca. 10 cm-vej vzdialenosti!
- Stlačte trysku a striekajte tekutinu rovno do oka alebo na ranu!
- Tryska sa nesmie dotýkať priamo rany alebo oka!
- Nepoužívajte výrobok, ak je tryska zanesená!