

Plum Očná sprcha ON-the-GO


V prípade nehôd očí spôsobených kyselinou a lúhom je popri okamžitej prvej pomoci najdôležitejšie, aby ste vyhľadali lekára. Vyplachovanie očí pokračujte aj počas cesty!

Vzdialenosť medzi pracoviskom a nemocnicou určuje, koľko očných sprch ON-the-GO budete presne potrebovať. Napríklad: na cestu, ktorá trvá 30 minút, sú potrebné 2 balenia (teda 6 ks 500 ml-vých) očných sprch ON-the-GO k optimálnemu vyplachovaniu očí.

Optimálna bezpečnosť – spoľahlivá prvá pomoc

Súčasná aplikácia Očnej sprchy prvej pomoci Plum a pH Neutralu umožňuje poskytnutie rýchlej a účinnej prvej pomoci. Pri očných úrazoch spôsobených chemikáliami doporučujeme nasledovné kombinované vyplachovanie:

- Postihnuté oko vyplachujte pH Neutralom (4.9%-ný sterilný fosfátový pufer), aby ste čím rýchlejšie obnovili normálnu hodnotu pH očí!

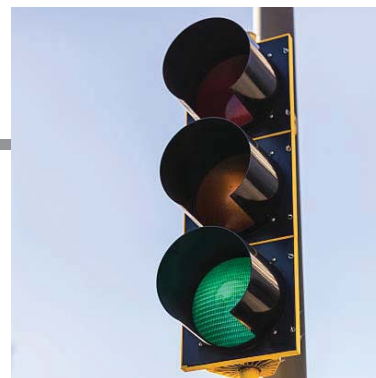

- Plum Očná sprcha ON-the-GO

Aj počas cesty pokračujte vo vyplachovaní očnou sprchou prvej pomoci Plum (0.9%-ný roztok chloridu sodného), až kým sa nedostanete k lekárovi alebo na pohotovosť najbližšej nemocnice!



V bezpečí s Plum Očnou sprchou ON-the-GO!

Praktická sada v škatuli, 3 x 500 ml Očnej sprchy prvej pomoci Plum, ktorá obsahuje 0.9%-ný sterilný solný roztok.

Škatuľu si jednoducho môžete vziať so sebou v aute, kým sa nedostanete k lekárovi alebo do nemocnice. Nádoby môžete používať aj jednotlivito, ale sú vhodné aj ako náhradné balenia staníc prvej pomoci.

- Doba vyplachovania: cca. 15 minút
- Číslo materiálu: 4620
- Rozmery: 261 x 75 x 225 mm