

Plum sredstvo za ispiranje očiju ON-the-GO


U slučaju povrede oka uzrokovane kiselinom ili bazom, važno je da pored neposrednog pružanja prve pomoći što pre zatražite savet lekara. U tom slučaju, ispiranje očiju treba nastaviti i na putu do medicinske ustanove!

Tačna količina potrebnog sredstva za ispiranje očiju ON-the-GO zavisi od udaljenosti između radnog mesta i bolnice. Na primer: ako put traje 30 minuta, za optimalno ispiranje oka potrebne su 2 kutije (tj. 6 x 500 ml) sredstva za ispiranje očiju ON-the-GO.

Optimalna sigurnost - pouzdana prva pomoć

Zajednička primena Plum sredstva za hitno ispiranje očiju i pH-Neutrala omogućava brzu i efikasnu prvu pomoć. U slučaju povrede oka uzrokovane hemikalijom, preporučujemo sledeće kombinovano ispiranje:

- Ispirajte oštećeno oko pH-Neutralom (4,9%-tni sterilni fosfatni pufer) da biste što pre uspostavili normalnu pH-vrednost oka.

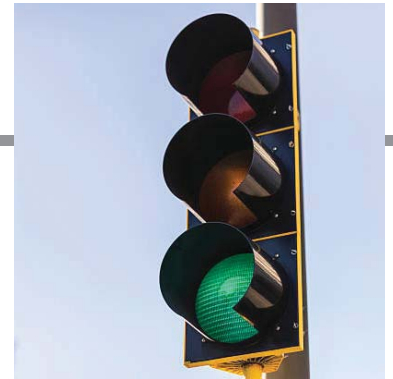

- Plum sredstvo za ispiranje očiju ON-the-GO

Na putu do lekara ili odeljenja za hitnu pomoć nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju (0,9%-tna otopina natrijum hlorida).



Sigurnost sa Plum sredstvom za ispiranje očiju ON-the-GO

Praktičan komplet u kutiji sa 3 x 500 ml Plum sredstva za hitno ispiranje očiju koje sadrži 0,9%-tnu sterilnu otopinu natrijum hlorida.

Kutiju možete lako poneti sa sobom u kolima, dok ne dođete do lekara ili bolnice. Bočice se mogu koristiti i pojedinačno, a takođe su pogodne i za ponovno punjenje stanica za ispiranje očiju.

- TRAJANJE ISPIRANJA: oko 15 minuta
- Broj artikla 4620
- Veličina: 261 x 75 x 225 mm