

Plum szemkimosó ON-the-GO


Sav és lúg okozta szemsérülések esetén az azonnali elsősegély mellett fontos, hogy mielőbb felkeressünk egy orvost. Ilyenkor a szemöblítést út közben is folytatni kell!

A munkahely és a kórház távolsága határozza meg, hogy pontosan mennyi ON-the-GO szemkimosóra van szükség. Például: egy 30 perces út során 2 doboznyi (azaz 6 db 500 ml-es) ON-the-GO szemkimosó kell a szem optimális öblítéséhez.

Optimális biztonság - megbízható elsősegély

A Plum elsősegély szemkimosó és a pH Neutral együttes alkalmazása gyors és hatékony elsősegélyt tesz lehetővé. Vegyszeres szembalesetek esetén az alábbi, kombinált öblítést javasoljuk:

- Öblítse a sérült szemet pH Neutrallal (4.9%-os steril foszfátpuffer), a szem normál pH értékének mielőbbi helyreállításához!

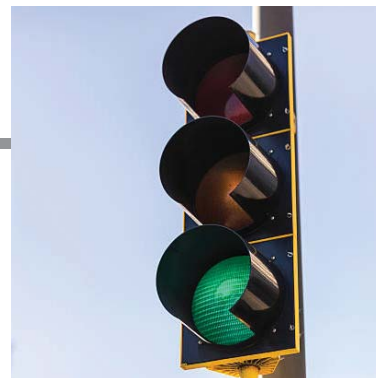

■ Plum szemkimosó ON-the-GO:

Útközben is folytassa az öblítést Plum elsősegély szemkimosóval (0.9%-os nátrium-klorid oldat), amíg meg nem érkezik az orvoshoz, vagy a sürgősségi osztályra!



Biztonságban a Plum ON-the-GO szemkimosóval!

Praktikus készlet dobozban, 3 x 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval, melyek 0.9%-os steril sóoldatot tartalmaznak.

A dobozt könnyen magával viheti az autóban, amíg az orvoshoz vagy a kórházba nem ér. A flakonok egyesével is felhasználhatóak, de szemkimosó állomások utántöltéséhez is alkalmasak.

Öblítési idő: kb. 15 perc
Cikkszám: 4620
Méret: 261 x 75 x 225 mm