

Sebtisztító és szemkimosó spray


Aeroszol 0.9%-os steril nátrium-klorid oldattal

Gyors és hatékony elsősegély másodpercek alatt
- bőrre és szemre egyaránt!

Az új Plum sebtisztító és szemkimosó spray azonnali és hatékony elsősegélyt tesz lehetővé apróbb balesetek (például kisebb karcolások, vágások, por és piszok szembe kerülése) esetén. Segít minimálisra csökkenteni a további fertőzés vagy károsodás veszélyét.

A Plum sebtisztító és szemkimosó spray hordozható és könnyen használható. Steril sóoldatot tartalmaz, alkalmazása fájdalommentes. Bármilyen szögben használva egyenletes öblítést biztosít. A 0.9%-os steril sóoldat elég erős ahhoz, hogy megtisztítsa a sebeket az idegen anyagoktól, szennyeződésektől, ugyanakkor kellően kíméletes - így a szem öblítéséhez is alkalmas. Használatát ajánljuk az ipari szektorban, gyártósorokon, laboratóriumokban dolgozóknak; veszélyes anyagok szállításával foglalkozóknak; valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársainak.

Kíméletes,
ám hatékony sebtisztító
és szemkimosó spray!

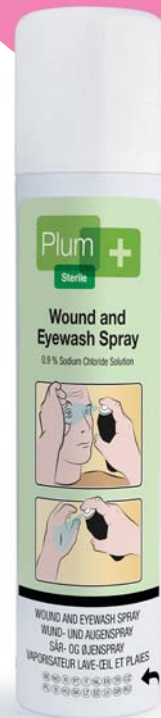

250 ML PLUM SEBTISZTÍTÓ ÉS
SZEMKIMOSÓ SPRAY, PORVÉDŐVEL


TERMÉKELŐNYÖK:

- Egy kézzel is könnyen, gyorsan használható
- Biztonságos, precíz, hatékony öblítés
- Porvédővel ellátva, mely védi a fúvókát a szennyeződésektől
- Könnyen hordozható, nem gyúlékony aeroszol
- A termék tartalmának 100%-a felhasználható
- Környezetbarát, és teljes mértékben újrahasznosítható
- Hipoallergén
- Steril megoldás - tartósítószerrel nélkül!
- Bontatlan állapotban 3 évig megőrzi a minőségét. A lejárati dátum a doboz alján található.

Öblítési idő: ≥ 15 perc
Méretek: M: 240 x Ø 52 mm
Kiszereles: 12 x 250 ml
Cikkszám: 4554

Kiszereles: 24 x 250 ml
Cikkszám: 45540

A Plum sebtisztító és szemkimosó spray az Orvostechikai Eszközökről Szóló Irányelv osztályozási rendszerének megfelelő CE minősítéssel rendelkezik.

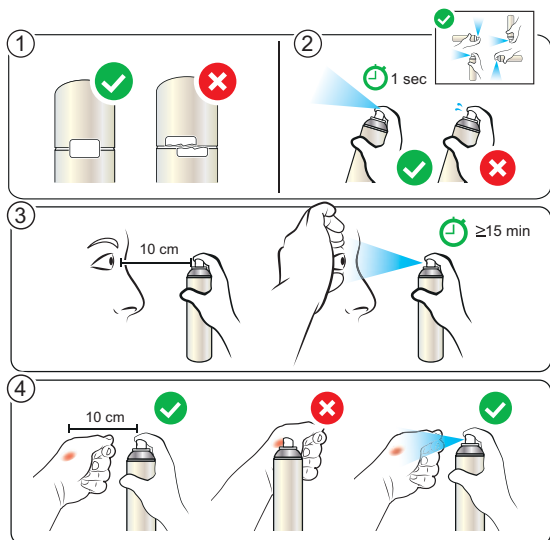

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- A spray a kiürüléséig használható; a folyadék az utolsó cseppig steril marad!
- Ha még nem használták korábban a terméket, akár 15 perces folyamatos öblítési időt biztosít!
- Használat előtt tisztítsa meg a fúvókát: rövid ideig permetezzen a levegőbe!
- A sérült területtől (szem, bőr) kb. 10 cm-es távolságból használja a spray-t!
- Nyomja le a fúvókát, és permetezze a folyadékot egyenletesen a szembe, vagy a sebre!
- A fúvóka ne érjen hozzá közvetlenül a sebhez, vagy a szemhez!
- Ne használja a terméket, ha a fúvóka eltömődött!