




WipeCare Body Hygiene

Za udobno vzdrževanje osebne higiene



Uporabo izdelka WipeCare Body Hygiene priporočamo osebam, ki opravljajo nego bolnikov, in sicer ko kopanja ali umivanja bolnikov ni mogoče izvesti drugače. Veliki in mehki robčki za brisanje so nežni do kože ter ustvarijo občutek čistosti in svežine – brez vode, mila in brisače. Navlaženi robčki za brisanje so pripravljene za takojšnjo uporabo. Tekočina za čiščenje se hitro suši na koži ter ne potrebuje nadaljnega brisanja ali sušenja.

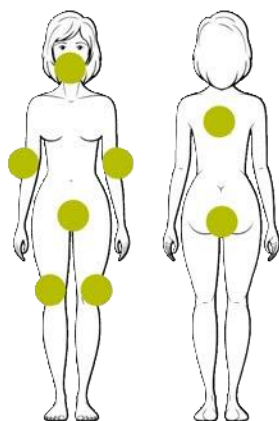

- Izdelku je bila dodeljena oznaka "Nordic Swan", ker ne vsebuje barv in vonjev.
- 4,5-5,5 pH: tudi kot robček za brisanje intimnih delov telesa.
- Ima vlažilni učinek in ne izsuši kože.
- Namenjen je za uporabo pri sobni temperaturi, vendar se lahko segreje tudi v mikrovalovnih pečicah.
- V primeru vročine se lahko uporablja tudi hladen.

Izdelek je na voljo v dveh različnih pakiranjih:

Pakiranje, 8 kosov: primerno za umivanje pacientov, ki so privezani za posteljo. Robčki za čiščenje lahko očistijo celo površino telesa pacienta.

Pakiranje, 4 kosi: priporočljivo za osvežitev posameznih delov telesa tekom dneva.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo na zadnji strani pakiranja.



Ime izdelka	Številka izdelka	Vsebina	Pakiranje
WipeCare Body Hygiene	5243	4 kos. robčkov za čiščenje / 20x23 cm	60 x 4 robčki
WipeCare Body Hygiene	5244	88 kos. robčkov za čiščenje / 20x23 cm	30 x 8 robčkov

Področje uporabe: čistilni robčki za enkratno uporabo za celo telo. Priporočljivo področje uporabe: v bolnišnicah, v domovih za starejše ali v oskrbi hospica. Primerni za udobno, higiensko in učinkovito pranje pacientov, ki so privezani za posteljo. Prav tako jih lahko hranite tudi v reševalnih vozilih in vozilih za prevoz bolnikov.

Navodila za uporabo: Robčki (v pakiranju) se lahko po potrebi segrejejo v mikrovalovni pečici. Pakiranje 4-ih kosov segrejte do največ 25 sekund, pakiranje od 8-ih kosov pa do največ 40 sekund pri 700 W vhodne moči. Pred uporabo vedno preverite temperaturo robčkov! Pri čiščenju posameznih delov telesa upoštevajte navodila za uporabo, ki se nahajajo na embalaži izdelka. Uporabljene robčke za brisanje vedno vrzite.

Skladiščenje: po uporabi vedno zaprite embalažo. Robčke hranite v suhem prostoru, kjer ni nevarnosti pred zmrzaljo in zaščitene pred neposredno sončno svetlobo.

Sestavine: Aqua, Phenoxyethanol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride.

plum

www.plum.hu/si