



Plum elsősegély szemkimosó - Termékinformáció

Termékleírás

A Plum elsősegély szemkimosó 0,9%-os steril sóoldatot tartalmaz, mely megegyezik a szemfolyadék természetes sótartalmával. Ez az izotóniás oldat alkalmas a szembal-esetek utáni azonnali öblítéshez. A flakonok ergonomikus kupakja biztosítja, hogy az öblítőfolyadék lágy, és egyenletes sugárban érje a szemeket. Nyomja össze enyhén a flakont öblítés közben! A DUO flakonok speciális kialakítása lehetővé teszi a két szem egyidejű öblítését is. Szemkimosóink orvosi eszközöknek minősülnek, az EU 92/42/EEC irányelve alapján. A vonatkozó biztonsági adatlap weboldalunkról letölthető.



Milyen esetekben használjunk Plum szemkimosót?

A Plum elsősegély szemkimosó alkalmas idegen testek, szennyeződések (például por, piszok, fém és fa szilánkok, stb), sőt egyes vegyszerek, például olajok és oldószerek öblítéséhez is. A baleset bekövetkeztekor azonnal meg kell kezdeni a szemöblítést - elkerülve, hogy az idegen anyagok a szemben ragadjanak, maradandó sérülést okozva. Maró anyagok, savak és lúgok okozta sérülések esetén a pH Neutral szemkimosónkat ajánljuk. A pH Neutral egy 4,9%-os foszfátpuffer, savak és lúgok semlegesítéséhez. A pH Neutral használata után folytassa az öblítést a Plum elsősegély szemkimosóval, amíg az orvoshoz nem ér! **FONTOS! Szemsérülések esetén mindig forduljon orvoshoz!**



Elsősegély terv szembalesetekhez

ANYAG	SZEMKIMOSÓ	FOLYTASSA AZ ÖBLÍTÉST	ÖBLÍTÉSI IDŐ
Idegen szennyeződések (por, piszok, korom, fa és fém szilánkok)	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítse a szemet, amíg a szennyeződés megszűnik.
Savas kémhatású vegyszer	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítse a szemet két percig pH Neutrallal (amíg a flakon ki nem ürül), majd folytassa Plum elsősegély szemkimosóval, míg az orvoshoz nem ér.
Lúgos kémhatású vegyszer	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítse a szemet két percig pH Neutrallal (amíg a flakon ki nem ürül), majd folytassa Plum elsősegély szemkimosóval, míg az orvoshoz nem ér.
Egyéb sérülések (pl. olaj, oldószér)	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítse a szemet, amíg a szennyeződés megszűnik, vagy amíg az orvoshoz nem ér.
Sérülések a bőrön (sav, lúg és egyéb vegyszerek)	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítse a sérült területet két percig pH Neutrallal (amíg a flakon ki nem ürül), majd folytassa Plum elsősegély szemkimosóval a fájdalom megszűnéséig, vagy míg az orvoshoz nem ér.

Elsősegély tervünkől megtudhatja, hogyan öblítse szemét különféle sérülések esetén.

Plum elsősegély szemkimosó - Termékinformáció



A szemkimosó előnyei:

- Magas szintű funkcionalitás: a flakonokat a DIN EN 15154-4 minősítésnek megfelelően állítják elő.
- Rugalmas megoldás: a flakonok több méretben is elérhetőek, mozgó munkaadásokon is alkalmazhatóak, de akár szemkimosó állomás részeként a falra is felszerelhetőek.
- Széleskörű felhasználási lehetőségek (pl. az ipari szektorban, laboratóriumokban, elsősegély készlet részeként, mobil alkalmazásra járművekben, stb.)
- Egyszerűen kezelhető - a sérült személy egyedül, segítség nélkül is használhatja a szemkimosókat.
- Zárt állapotban a termék szavatossági ideje 3 év.
- A flakonok nem igényelnek karbantartást, sem a folyadék cseréjét.

Hogyan használja a Plum szemkimosót?



Távolítsa el a flakont az állomásból.



Forgassa el a kupakot a nyíl irányába, amíg a zár felszakad.



Hajtsa hátra a fejét, és kezdje meg az öblítést.



Akár előre hajolva is öblíthet, így a folyadék nem éri a ruháját.

Használati utasítás

A termék csak egyszer felhasználható! Ne használja a szavatossági idő lejártá után (a lejárat dátumot a címkén találja)! Fontos, hogy a kupakon lévő zár sértetlen legyen, csak így biztosítható a steril öblítés. Ha a zár már sérült, ne használja újra a terméket, mert fennáll a fertőzés veszélye!

Kiszerezések

Úrtartalom	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml DUO	1000 ml DUO
Cikkszám	4691	4604	4707	4861	4800
Öblítési idő	kb. 2 perc	kb. 5 perc	kb. 10 perc	kb. 2 perc / szem	kb. 5 perc / szem
Méret	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm