



## pH Neutral - Termékinformáció

### Termékleírás


A pH Neutral szemkimosó 2 perces öblítési megoldást kínál savak és lúgok okozta szembaleseteknél. A flakonok ergonomikus kupakja biztosítja, hogy az öblítőfolyadék lágy, és egyenletes sugárban érje a szemeket. Nyomja össze enyhén a flakont öblítés közben! A DUO flakonok speciális kialakítása lehetővé teszi a két szem egyidejű öblítését is. Szemkimosóink orvosi eszközöknek minősülnek, az EU 93/42/EEC irányelve alapján. A vonatkozó biztonsági adatlap weboldalunkról letölthető.



### Milyen esetekben használjunk pH Neutralt?

A pH Neutral szemkimosó egy 4,9%-os foszfátpuffer, mely hatékonyan semlegesíti a savas és lúgos vegyszereket, és a lehető leggyorsabban segít helyreállítani a szem normál pH értékét. A tiszta víz, vagy a 0,9%-os steril sóoldat csupán felhígítja ezeket az anyagokat (1. ábra), de a maró hatásukat nem tudja csökkenteni. A pH Neutral használata után javasoljuk, hogy 0,9%-os sóoldatot tartalmazó Plum szemkimosóval folytassa az öblítést, amíg az orvoshoz nem ér! **FONTOS!** Szemsérülések esetén mindig forduljon orvoshoz!

1. ábra: A pH Neutral és a 0,9%-os sóoldat semlegesítő hatása

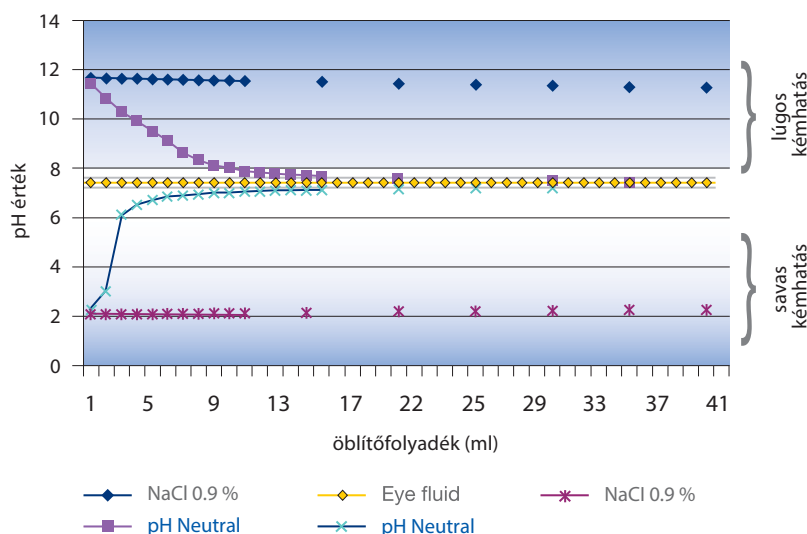

A vizsgálatot a Plum A/S laboratóriumában végezték (in vitro). A vizsgálat során pH Neutralt és 0,9%-os nátrium-klorid oldatot adagoltak egy 1 csepp kénsavat + 40 ml vízben feloldott 1 csepp kálium-hidroxidot + 40 ml vizet tartalmazó keverékhez. A pH értékben történő változást, illetve a felhasznált öblítőfolyadék mennyiségét mérték.



## A szemkimosó előnyei:

- Magas szintű funkcionalitás: a flakonokat a DIN EN 15154-4 minősítésnek megfelelően állítják elő.
- Rugalmas megoldás: a flakonok több méretben is elérhetőek, mozgó munkaadásokon is alkalmazhatóak, de akár szemkimosó állomás részeként a falra is felszerelhetőek.
- Széleskörű felhasználási lehetőségek (pl. az ipari szektorban, laboratóriumokban, elsősegély készlet részeként, mobil alkalmazásra járművekben, stb.)
- Egyszerűen kezelhető - a sérült személy egyedül, segítség nélkül is használhatja a szemkimosókat.
- Zárt állapotban a termék szavatossági ideje 3 év.
- A flakonok nem igényelnek karbantartást, sem a folyadék cseréjét.

## Hogyan használja a Plum szemkimosót?



Távolítsa el a flakont az állomásból.



Forgassa el a kupakot a nyíl irányába, amíg a zár felszakad.



Hajtsa hátra a fejét, és kezdje meg az öblítést.



Akár előre hajolva is öblíthet, így a folyadék nem éri a ruháját.

## Használati utasítás

A termék csak egyszer felhasználható! Ne használja a szavatossági idő lejártá után (a lejárat dátumot a címkén találja)! Fontos, hogy a kupakon lévő zár sértetlen legyen, csak így biztosítható a steril öblítés! Ha a zár már sértült, ne használja újra a terméket, mert fennáll a fertőzés veszélye!

## Kiszerezések

Úrtartalom	200 ml	500 ml Duo	1000 ml szemzuhany
Cikkszám	4691	4604	4707
Öblítési idő	kb. 2 perc	kb. 2 perc / szem	kb. 2 perc
Méret	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm