



ELSŐSEGÉLY TERV SZEMBALESETEKHEZ plum

SZENNYEZŐ ANYAG	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉS	TOVÁBBI ÖBLÍTÉS	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉSI IDŐ
Idegen anyagok por, korom, fa és fém szilánkok stb...	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet, amíg a szennyeződés teljesen megszűnik.
Sav	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet pH Neutral szemkimosóval körülbelül 2 percig, majd folytassuk Plum elsősegély szemkimosóval (fiziológias sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.
Lúg	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet pH Neutral szemkimosóval körülbelül 2 percig, majd folytassuk Plum elsősegély szemkimosóval (fiziológias sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.
Egyéb vegyszerek	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet, amíg az orvoshoz nem érünk.



A Plum szemkimosó egyszerűen használható, ha szembaleset történik.



Forgassa el a kupakot a nyíl irányába, amíg a zár felszakad.



Hajoljon kissé hátra, nyomja össze a flakont, és kezdje meg az öblítést.



Ezután a szem úgy is öblíthető, ha enyhén előrehajol.

FONTOS!

Mindig győződjünk meg arról, hogy a szemkimosó folyadék egyenesen sugárban éri a szemet.

Ha mindkét szem sérült a balesetben, használjunk DUO szemöblítőt.