

Sredstvo za izpiranje oči ON-the-GO Plum


V primeru poškodbe oči, ki jo povzroči kislina ali lug, je pomembno, da poleg neposredne takojšnje zdravniške pomoči čim prej poiščete tudi pomoč zdravnika. V tem primeru je z izpiranjem očesa treba nadaljevati tudi na poti do zdravstvene ustanove!

Natančna količina sredstva za izpiranje oči ON-the-GO je odvisna od razdalje med delovnim mestom in bolnišnico. Na primer: če pot traja dlje kot 30 minut, sta za optimalno izpiranje očesa potrebni 2 škatli (oz. 6 x 500 ml) sredstva za izpiranje oči ON-the-GO.

Optimalna varnost – zanesljiva prva pomoč

Skupna uporaba sredstev za hitro izpiranje oči Plum in pH Neutral zagotavlja hitro in učinkovito prvo pomoč. V primeru poškodb oči, ki jih povzročijo kemikalije, priporočamo naslednje kombinirano izpiranje:

- Poškodovano oko izpirajte s sredstvom pH Neutral (4,9 % sterilnega fosfatnega pufru), da lahko čim prej dosežete normalno pH vrednost očesa!

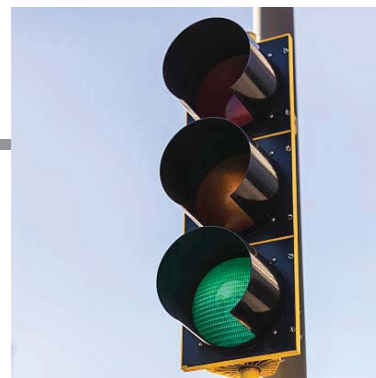

- Sredstvo za izpiranje oči ON-the-GO Plum

Na poti do zdravnika ali urgentnega centra nadaljujte z izpiranjem s pomočjo sredstva za hitro izpiranje oči Plum (0,9 % raztopine natrijevega klorida).



Varnost zahvaljujoč sredstvu za izpiranje oči ON-the-GO Plum

Praktični komplet v škatli s 3 x 500 ml sredstva za hitro izpiranje oči Plum, ki vsebuje 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida.

Škatlo lahko preprosto vzamete s sabo v avtomobil, dokler ne pridete do zdravnika ali bolnišnice. Plastenke se lahko uporabljajo tudi posamično, prav tako pa so primerne za ponovno polnjenje postaj za izpiranje oči.

- Čas izpiranja: pribl. 15 minut
- Številka izdelka: 4620
- Velikost: 261 x 75 x 225 mm