

Sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju

Aerosol s 0,9%-tnom sterilnom otopinom natrijevog klorida.

Brza i učinkovita prva pomoć za svega nekoliko sekundi - za kožu i oči!

Novi Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju omogućava pružanje neposredne i učinkovite prve pomoći u slučaju manjih nezgoda (na primjer manjih ogrebotina, posjekotina ili u slučaju ulaska prašine ili prljavštine u oko). Pomaže minimalizirati rizik od daljnje infekcije ili oštećenja.

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju je prenosiv i jednostavan za uporabu. Sadrži sterilnu otopinu natrijevog klorida. Primjena spreja je bezbolna i omogućuje ravnomjerno ispiranje pod bilo kojim kutom. 0,9%-tna sterilna otopina natrijevog klorida je dovoljno jaka da očisti rane od stranih tvari i prljavština, a istovremeno je i dovoljno nježna, zbog čega je pogodna i za ispiranje očiju.

Preporučujemo ga za uporabu u industrijskom sektoru, u proizvodnim linijama, u laboratorijima, prijevoznicima opasnih tvari, policijskim službenicima te u zaštiti i spašavanju od katastrofa.

Nježni, ali učinkoviti sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju




PREDNOSTI PROIZVODA:

- Jednostavno i brzo korištenje čak i s jednom rukom.
- Sigurno, precizno i učinkovito ispiranje - sa zaštitom od prašine koja štiti mlaznicu od prljavština
- Jednostavan za prenošenje, nezapaljivi aerosol
- Sadržaj proizvoda se može 100-procentno upotrijebiti
- Ekološki prihvatljiv; može se u potpunosti reciklirati
- Hipoalergenski
- Sterilno rješenje - bez konzervansa!
- U neotvorenom stanju zadržava kvalitetu 3 godine. Rok valjanosti proizvoda otisnut je na dnu kutije.

PLUM SPREJ ZA ČIŠĆENJE RANA I ISPIRANJE OČIJU, SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE

Pakiranje:	24 x 50 ml
Broj artikla:	45531
Pakiranje:	12 x 250 ml
Broj artikla:	4554
Pakiranje:	24 x 250 ml
Broj artikla:	45540
Zidni nosač, 250 ml	
Broj artikla:	4123
Pakiranje:	24 darab

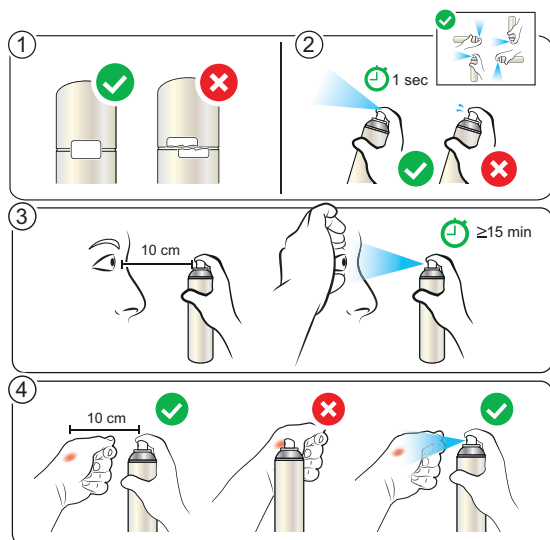

UPUTE ZA UPORABU:

- Sprej se može koristiti dok se ne isprazni; tekućina ostaje sterilna do posljednje kapi!
- Proizvod - ako prethodno nije bio korišten - omogućuje kontinuirano ispiranje čak i do 15 minuta.
- Prije uporabe očistite mlaznicu: prskajte kratko u zrak!
- Sprej treba koristiti s udaljenosti od oko 10 cm od oštećenog područja (oko, koža).
- Pritisnite mlaznicu i prskajte tekućinu ravnomjerno u oko ili na ranu.
- Mlaznica ne smije izravno dodirnuti ranu ili oko!
- Nemojte koristiti proizvod ako je mlaznica začepljena!

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju raspolaže CE-certifi katom prema sustavu klasifikacije direktive o medicinskim sredstvima.